

medi CLEAN

Pflegeset für Kompressionsstrümpfe



medi CLEAN

Mit medi CLEAN - unserem Spezialwaschmittel - pflegen und behandeln Sie Ihre medi Kompressionsstrümpfe sehr schonend.

Geben Sie auf zwei Liter handwarmes Wasser 1cl Waschmittel. Spülen Sie Ihren mediven Kompressionsstrumpf gründlich mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn. medi CLEAN - ideal zur täglichen Wäsche!

Fleckenfluid medi spot ex

Mit dem neuen Fleckenfluid medi spot ex können Sie Schuhabrieb an der Ferse oder Spitze Ihres Kompressionsstrumpfes vor der Wäsche lösen. Bringen Sie hierzu medi spot ex auf die verschmutzte Stelle und waschen Sie das Fleckenfluid nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit unter fließendem Wasser aus.

medi. ich fühl mich besser.